



RRS® 75 Hyalift® Proactive



DESCRIPCION:

RRS®75 HYALIFT® Proactive es un dispositivo médico estéril clase III fabricado según la Directiva 93/42/EEC, implante dérmico reabsorbibles que contiene Acido Hialurónico concentrado no reticulado de origen biotecnológico asociado a un complejo biorevitalizante y antioxidante destinado a la corrección de arrugas finas y a estimular la formación de colágeno y elastina.

PRESENTACION

Viales con 5 ml, cajas con 2 viales/ 6 viales / 12 viales

FORMULACION:

- Sodium Hyaluronato 75 mg/5ml
- Biorevitalizacion solución 118,15 mg/5ml
- Solución isotónica buffer (Cloruro sódico, ácido cítrico, Hidróxido sódico) q.s.

La solución Biorevitalizante contiene:

16 aminoácidos: Acido Glutámico, Alanina, Arginina, Aspartate, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Levoglutamida, Lisina, Prolina, Serina, Taurina, Treonina, Tirosina, Valina

5 polifenoles: R-2 Viniferin, ε-Viniferin, R-Viniferin, Iso-ε-Viniferina, Resveratrol

6 antioxidantes: Taurina, R-2 Viniferin, ε-Viniferin, R-Viniferin, Iso-ε-Viniferin, Resveratrol

INDICACIONES

Este producto está indicando en personas que presentan síntomas de cronoenvejecimiento y fotoenvejecimiento de la piel.

El objetivo es hidratar y reestructurar los tejidos mejorando la laxitud, el grosor y la elasticidad al tiempo que reducir los signos externos del envejecimiento.

MODO DE EMPLEO

El grupo de dispositivo médicos **RRS®75 HYALIFT®** se inyecta con o sin púlpas en la dermis, utilizando una aguja 30G o 32G, con el borde biselado de la aguja hacia abajo. Sin embargo, el facultativo deberá utilizar el método más apropiado, que entre otros pueden ser: inyecciones lineal superficiales múltiples, tunelización retrógrada, en abanico, técnica “cris-cross”, técnica “fish-bone” o incluso técnicas transdérmicas. También se pueden utilizar técnicas automatizadas para inyección tales como las pistolas mesoterapéuticas. En pieles sensibles, la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento puede ser conveniente. Una inyección demasiado profunda en el tejido subcutáneo no produce el incremento deseado en el volumen del tejido, ni tampoco la biorevitalización esperada.


El grupo de dispositivos médicos **RRS®75 HYALIFT®** puede mezclarse eventualmente con otras soluciones inyectables, dependiendo de las necesidades. En este caso, el facultativo es el responsable de verificar la compatibilidad e idoneidad de los productos que utiliza.

El grupo de dispositivos médicos **RRS®75 HYALIFT®** debe utilizarse en condiciones asépticas apropiadas a una clínica autorizada, en pieles saludables y no inflamadas, correctamente desinfectadas.

Las zonas que se suelen tratar son:

- Rostro
- Cuello
- Escote
- Dorso de las manos
- Interior de los brazos
- Interior de los muslos
- Zona periumbilical
- Abdomen (estrías)

ANTIAGING MESO TREATMENT

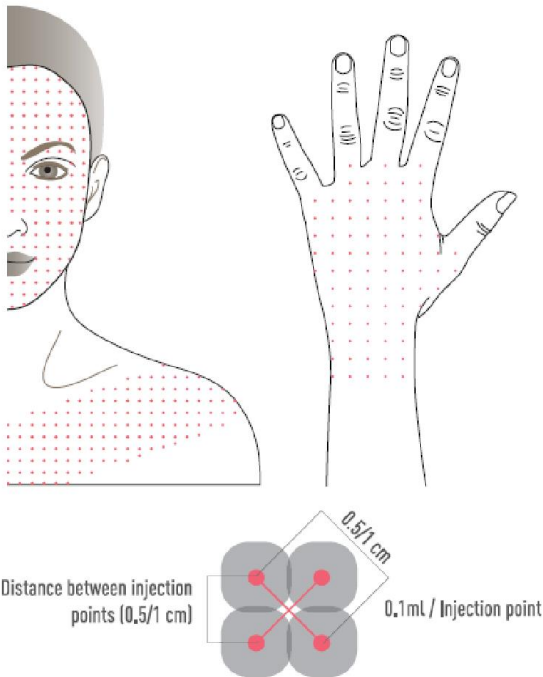

Distancia entre los puntos de inyección (0.5/1cm) - 0.1 ml / punto de inyección

PROTOCOLO DE USO

Utilizar a conveniencia del facultativo hasta alcanzar los resultados deseados.
Tratamiento recomendado: 1 sesión por semana durante 4-6 semanas.
El protocolo puede repetirse 2-3 veces al año.

COMBINACION CON OTROS TRATAMIENTOS ESTETICOS

- Toxina botulínica: dos semanas antes/después de la inyección RRS
- Equipo micropinchazos: las inyecciones de RRS pueden ser hechas inmediatamente después
- Peeling: El tiempo de distancia puede ser diferente, las inyecciones de RRS pueden ser hechas inmediatamente después de peelings usuales
- RRS puede realzar resultados de otros tratamientos médicos o equipos
- Tratamiento de casa: AD cuidado diario Peeling anti-aging

RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES

RRS Hyalift 75 Proactive pueden ser usados bajo condiciones asepticas apropiadas en una clínica autorizada, con una piel desinfectada

Antes del tratamiento:

Antes del tratamiento, el doctor debería informar al paciente:

- sobre las indicaciones y efectos
- posibilidades de los efectos colaterales (dolor, enrojecimiento, equimosis, sensación de picor e hinchazón. Inflamación local, normalmente desaparecen en 24 horas
- Revisión de test de alergia

Las pieles sensibles pueden tener beneficios si se aplica una crema anestésica antes del tratamiento

Recomendamos un consentimiento firmado por el paciente

Después del tratamiento

Evitar las temperaturas extremas

Saunas – Hamman

Exposición directa del sol o UV

Al día siguiente se puede usar maquillaje

PRECAUCIONES - CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los ingredientes. Los pacientes que presenten alguna alteración de la piel, enfermedad de la piel, infecciones o secuelas de infecciones de estreptococos. Pacientes que tomen inmonodepresores, terapia de corticoides, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes descompensada, reumatitis aguda, angina repetida y endocarditis

*No hay estudios disponibles para el uso durante el embarazo y lactancia o en caso de menores de 8 años

**Los protocolos son los mismos que para el RRS Hyalift 35 y RRS Hyalift 75

CONSERVACIÓN

No exponer a la luz. Mantener a temperaturas entre 2 y 35°. No congelar, no calentar.